

Prélèvement d'échantillon sur écouvillon nasal approprié

REF 256089

1

Le kit BD Veritor Système SARS-CoV-2 comprend des écouvillons pour le prélèvement nasal

2



Insérez l'écouvillon dans une narine. La pointe de l'écouvillon doit être insérée jusqu'à 2,5 cm du bord de la narine. Tournez l'écouvillon 5 fois le long de la muqueuse à l'intérieur des narines pour s'assurer que le mucus et les cellules soient collectés.

3



En utilisant le même écouvillon, répétez ce processus pour l'autre narine afin de vous assurer qu'un échantillon adéquat est prélevé dans les deux cavités nasales.

4



Retirez l'écouvillon de la cavité nasale. L'échantillon est maintenant prêt pour l'analyse à l'aide du kit BD Veritor Système SARS-CoV-2.

Les bonnes pratiques lors du prélèvement d'échantillon

- Prélevez un échantillon dès que possible après l'apparition des symptômes.
- Procédez à l'analyse de l'échantillon immédiatement.
- Utilisez uniquement les écouvillons fournis avec le kit.
- Reportez-vous aux: Laboratory support for COVID-19 in the EU/EEA at <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support>

Informations techniques: contactez le service technique et l'assistance BD au Covid19TechnicalSupportCanada@bd.com. Pour plus de détails concernant l'usage du produit, référez-vous à la notice d'utilisation.



 Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, Maryland 21152 USA

 Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland

BD, le logo BD et Veritor sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. ©2021 BD. Tous droits réservés.

 bd.com/e-labeling

L012402(01)
2020-09