




PeritX™

Sistema de Cateter Peritoneal

Gerencie a Ascite Maligna e
Não Maligna Recorrente.

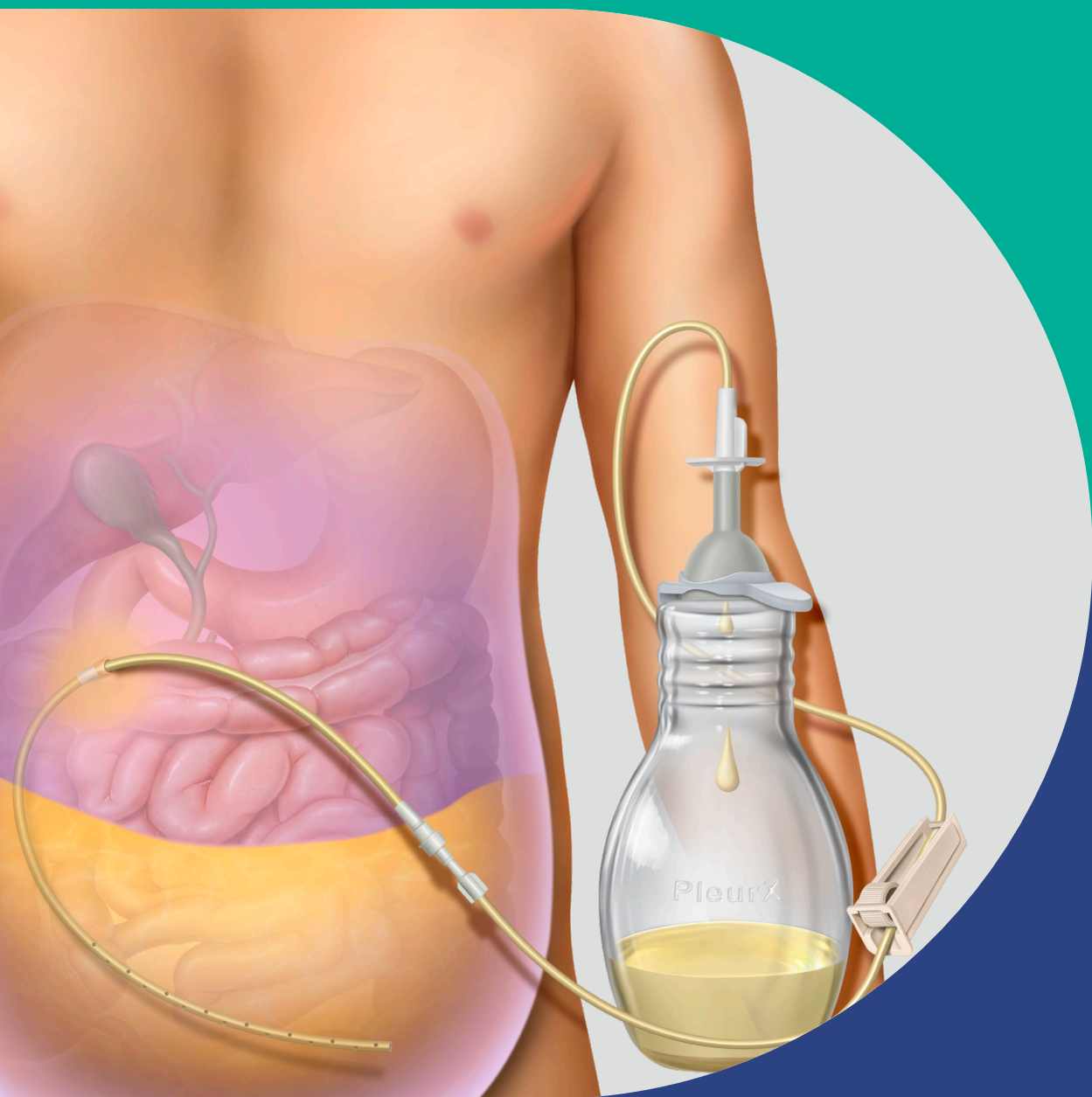

Projetado com tecnologia de vácuo ativo para ajudar a facilitar a drenagem de fluido ascite, o Sistema de Cateter Peritoneal PeritX™ permite que seus pacientes gerenciem o fluido de ascite maligna e não maligna em casa, eliminando a necessidade de procedimentos de paracentese repetidos.

O mini kit de cateter peritoneal PeritX™ é indicado para drenagem intermitente de longa duração de ascite maligna e não maligna, sintomática e recorrente que não responde ao tratamento médico da doença subjacente e para o tratamento paliativo de sintomas relacionados com a ascite recorrente.

O cateter peritoneal PeritX™ destina-se exclusivamente ao uso com o frasco de vácuo PeritX™, com frascos de vácuo de vidro e com tubo de drenagem bloqueável para ligação a sucção de parede ou portátil.

Válvula de segurança exclusiva

A válvula ajuda a evitar a passagem inadvertida de ar ou fluido através do cateter. Ele também ajuda a reduzir o risco de desconexão que pode ocorrer com uma conexão luer padrão.

Fenestrações

Fenestrações grandes e lisas promovem a drenagem e ajudam a reduzir o risco de oclusões.

Faixa de bário

A faixa de bário escura proporciona maior visibilidade sob fluoroscopia.

Frasco a vácuo

A tecnologia de vácuo ativo drena rapidamente sem a necessidade de gravidade. Os frascos estão disponíveis nos tamanhos de 500 mL e 1.000 mL.

Braçadeira de rolo

A braçadeira de rolo proporciona fácil controle do fluxo de drenagem para o máximo conforto.

Manguito de poliéster

Promove o crescimento do tecido e pode ajudar para manter o cateter firmemente no lugar.

Cateter de silicone 15,5 Fr

Cateter macio e flexível conforma-se ao espaço peritoneal e ajuda a minimizar o desconforto no local de inserção.



#50-9050A MINI KIT CATETER PERITONEAL PERITX™



50-9050A – O Mini Kit para Cateter Peritoneal PeritX™ contém:

Componentes de colocação	Componentes de drenagem	Componentes de curativo
• Cateter Peritoneal PeritX™ (15,5 Fr; 71 cm) • Introduutor de fio-guia com agulha • Seringa, 10 mL • Fio-guia com ponta em J, 60 cm • Introduutor removível, 16 Fr; 17,8 cm comprimento do dilatador; 14 cm comprimento da bainha • Tunelizador • Espuma de agulha	• Linha de drenagem com trava com ponta de acesso • Agulha, 17 G x 1 pol. (2,5 cm) • Adaptador de linha de drenagem 5 em 1 • Tampa de válvula	• Compressas de gaze, 4 pol. x 4 pol. (10,2 cm x 10,2 cm, Qde. 6) • Almofada de cateter de espuma • Curativo autoadesivo • Adesivo de número de lote (para rastreabilidade)

#50-7235A: TAMPA DA VÁLVULA DE SUBSTITUIÇÃO

(Para uso com o Sistema de Cateter Pleural PleurX™ ou Sistema de Cateter Peritoneal PeritX™)

A tampa da válvula ajuda a proteger o cateter da contaminação e ajuda a manter um caminho de drenagem limpo. Uma tampa de válvula está incluída no kit de drenagem e deve ser substituída cada vez que o paciente drenar.



PeritX™

Sistema de Cateter Peritoneal

SKU	Descrição
50-9050A	Mini Kit para Cateter Peritoneal PeritX™
50-7235A	Tampa de válvula de substituição para uso com o Sistema de PleurX™ ou sistema de Cateter PeritX™
50-8210	Garrafa de vácuo PleurX™ de 1.000 ml com tubo de Drenagem

www.bd.com/peritX

©2023 BD, BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA. Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com. Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso. Banco de imagens BD. BD-95016

