

BARD® MAGNUM®

Sistema Reutilizável de Biópsia



BARD® MAX-CORE®

Instrumento Descartável de Biópsia

Core Biópsia

Biópsia de tecidos moles



MAGNUM® Sistema Reutilizável de Biópsia

Tamanho mínimo. Potência máxima.®



A Bard é líder em biópsia por fragmento e tem o menor sistema reutilizável

- A leveza e o design ergonômico do instrumento MAGNUM® proporcionam maior controle e facilidade de manuseio durante os procedimentos de biópsia;
- Com 12cm de comprimento, a MAGNUM® é confortável e fácil de manusear.

Potência e Desempenho

- O mecanismo de mola proporciona velocidade alta o suficiente para obtenção de excelentes amostras;
- A potência do instrumento MAGNUM® permite ao médico penetrar com precisão em lesões difíceis, com deslocamento mínimo de tecido.




Design Funcional e Praticidade

- Opção de duas profundidades de penetração, de 15mm ou 22mm, para alcançar os resultados desejados em diversas aplicações.

Características que garantem maior versatilidade e melhor desempenho

- A agulha da MAGNUM® possui ampla gaveta e ponta afiada que permite cortar e obter fragmentos íntegros de tecido;
- Seu exclusivo espaçador permite realizar biópsia guiada por estereotaxia ou posicionar a agulha no caso de tomografia computadorizada (TC), sendo facilmente removido depois que a agulha é colocada no instrumento.

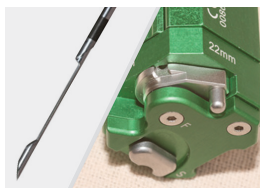

Surpreendentemente pequeno... incrivelmente potente.

Compatível com a agulha de biópsia coaxial TruGuide™ da Bard® para maior eficiência e precisão.




Max-Core®


Instrumento Descartável para Biópsia



Um procedimento simples para melhorar os resultados da biópsia

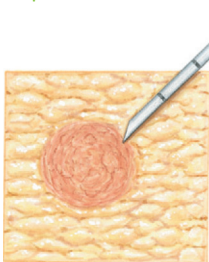


1. Posicionar a agulha de biópsia coaxial TruGuide™. Remover o estilete.

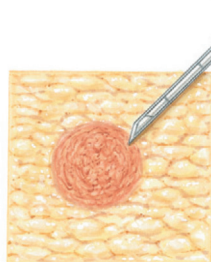

2. Avançar a agulha coaxial até a extremidade da cânula guia.

Reposicionamento da agulha para biópsia TruGuide™

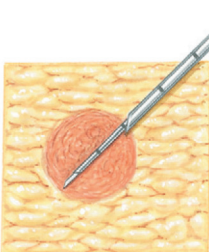

3. Fazer o disparo e retirar a agulha de biópsia. Remover a amostra de fragmento deixando a cânula guia no local.



4. Quando amostras adicionais da mesma área forem necessárias, reinserir o estilete ou a agulha de biópsia e fazer pequena alteração no ângulo da agulha guia. Se amostras de nova área forem necessárias, reinserir o estilete e reposicionar a agulha coaxial.

Qualidade previsível... simplicidade surpreendente.

Compatível com a agulha de biópsia coaxial TruGuide™ da Bard® para maior eficiência e precisão.



Informações de Produtos

MAGNUM® Sistema Reutilizável de Biópsia*

	Códigos das Agulhas Magnum®	Calibre (Gauge) X Comprimento (Cm)	Comprimento da Agulha Truguide™ (Cm)	Códigos das Agulhas Truguide™
●	MN2010	20 x 10	7,0	C2010B***
●	MN2013	20 x 13	10,0	C2013B***
●	MN2016	20 x 16	13,0	C2016B***
●	MN2020	20 x 20	17,0	C2020B***
●	MN1810	18 x 10	7,0	C1810B***
●	MN1813	18 x 13	10,0	C1813B***
●	MN1816	18 x 16	13,0	C1816B***
●	MN1820	18 x 20	17,0	C1820B***
●	MN1825	18 x 25	—	—
●	MN1830	18 x 30	—	—
●	MN1610	16 x 10	7,0	C1610B***
●	MN1613	16 x 13	10,0	C1613B***
●	MN1616	16 x 16	13,0	C1616B***
●	MN1620	16 x 20	17,0	C1620B***
●	MN1410	14 x 10	7,0	C1410B***
●	MN1413	14 x 13	10,0	C1413B***
●	MN1416	14 x 16	13,0	C1416B***
●	MN1420	14 x 20	—	—
●	MN1210	12 x 10	7,0	C1210B***
●	MN1213	12 x 13	10,0	C1213B***
●	MN1216	12 x 16	13,0	C1216B***
●	MN1220	12 x 20	—	—

Max-Core® Instrumento Descartável para Biópsia*

	Códigos do Max-Core®	Calibre (Gauge) X Comprimento (Cm)	Comprimento da Agulha Truguide™ (Cm)	Códigos das Agulhas Truguide™
●	MC2010	20 x 10	7,8	C2010A**
●	MC2016	20 x 16	13,8	C2016A**
●	MC2020	20 x 20	17,8	C2020A**
●	MC1810	18 x 10	7,8	C1810A**
●	MC1816	18 x 16	13,8	C1816A**
●	MC1820	18 x 20	17,8	C1820A**
●	MC1825	18 x 25	—	—
●	MC1610	16 x 10	7,8	C1610A**
●	MC1616	16 x 16	13,8	C1616A**
●	MC1410	14 x 10	7,8	C1410A**
●	MC1416	14 x 16	13,8	C1416A**

BARD MAGNUM INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL PARA BIÓPSIA CORE	80689090079
BARD TRUGUIDE AGULHA COAXIAL DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA	80689090075

Av. Alexandre Dumas, 2100 - 10º andar - Chácara Santo Antonio, 04717-004 - www.bardbiopsy.com
 Consulte os folhetos e rótulos do produto para quaisquer indicações, contraindicações, riscos, avisos, cuidados e informações de uso. Bard, Magnum® e Max-Core® são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da C. R. Bard, Inc. ou uma de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.

©2009 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados. BRB190834-R00 - Set/19

bd.com



©2019 BD, BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company.

RMS: 10178010189 / *RMS: 10178010189.